


<b>CZ</b>	<b>Návod k použití</b>	<b>2</b>
	Klekací židle Orion	
<b>SK</b>	<b>Návod na použitie</b>	<b>5</b>
	Kľakacia stolička Orion	

# MANUÁL



**medimas**<sup>TM</sup>  
DO IT FOR LIFE

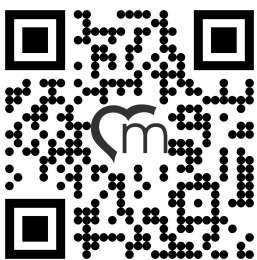

## PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybně sloužil mnoho let, přečtěte si prosím pozorně návod k použití.

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS



Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: číslo objednávky nebo při nákupu u našeho obchodního partnera model, datum prodeje a výrobní číslo.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

# Návod na použití rehabilitační klekačky ORION

### I. Technické údaje

Délka	67,5 cm
Šířka	42,5 cm
Nastavitelná výška	55-65 cm
Nosnost	100 kg
Kostra	bukové dřevo
Čalounění	eko kůže
Výška pěny	7,5 cm
Hmotnost	5 kg
Certifikát	CE dle směrnice rady 93/42/EHS

### II. Popis

Nastavitelná přenosná židle, která zajišťuje správnou polohu sedu. Podporuje vzpřímený sed a přirozené prohnutí bederní páteře a pomáhá u bolestí zad.



#### DŮLEŽITÉ

Kolečka je nutné pořádně dotáhnout, přiloženým nebo jiným klíčem. Jinak hrozí, že během krátkého období dojde ke stržení závitu.



### III. Konstrukce

- 1 Dřevěná konstrukce
- 2 Čalouněné polštáře 2 ks
- 3 Kolečka 4 ks
- 4 Výškový regulátor

### IV. Rozložení židle

- 1 Zvedněte horní část konstrukce za sedák.
- 2 Nastavte požadovanou výšku umístěním výškového regulátoru do příslušného otvoru.

### V. Údržba a čištění

- 1 Eko - kůže, koženka: čistit šetrným roztokem neparfémovaného mýdla s vlažnou vodou s pomocí jemného hadříku. Nepoužívat rozpouštědla a saponáty.
- 2 Lakované a chromované části: čistit pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívat rozpouštědla a brusné prostředky.
- 3 Dřevo, překližka: čistit pomocí vlhkého hadříku, utírat do sucha. Nepoužívat chemické prostředky.

### VI. Dezinfekce

Dezinfikovat běžně dostupnými dezinfekčními prostředky bez obsahu alkoholu a chloru.

### VII. Provozní poznámky

- 1 Na židli smí sedět pouze jedna osoba.

### VIII. Doporučení

- 1 Obeznamte se se záručními podmínkami a dodržujte pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu židle.

# Záruční list

(Nevyžaduje podpis ani razítko, reklamaci lze uplatnit bez dokladu o koupi - stačí číslo objednávky.)

Název výrobku	<b>Klekací židle Orion</b>	Číslo objednávky	
Kód zboží	<b>2P</b>	Datum prodeje	

## Zápisy záručních oprav

Datum nahlášení	Datum provedení	Popis vykonané práce	Razítko a podpis servis. technika

Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data nákupu na poškozený materiál či dílenské zpracování. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená přepravou, nesprávným použitím nebo jinou nehodou. Vadný produkt může být vrácen s popisem vad a adresou prodejce. Pro opravu v záruční době postupujte podle instrukcí, při objednávce nových částí opište číslo modelu, které je na krabici výrobku.



## POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybne slúžil mnoho rokov, prečítajte si prosím pozorne návod na použitie.

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS



Odporúčame používať originálne náhradné diely. Pri kontakte so servisným strediskom sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: číslo objednávky alebo pri nákupe u nášho obchodného partnera model, dátum predaja a výrobné číslo.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadny úraz ani škodu v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo použitia. Návod na použitie vždy uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste na jeho budúce použitie.

## Návod na použitie rehabilitačnej kľakačky ORION

### I. Technické údaje

Dĺžka	67,5 cm
Šírka	42,5 cm
Nastaviteľná výška	55-65 cm
Nosnosť	100 kg
Kostra	bukové drevo
Čalúnenie	eko kože
Výška peny	7,5 cm
Hmotnosť	5 kg

### II. Popis

Nastaviteľná prenosná stolička, ktorá zaisťuje správnu polohu sedu. Podporuje vzpriamený sed a prirodzené prehnutie bedrovej chrbtice a pomáha pri bolesti chrbta



#### DŮLEŽITÉ

Kolieska je nutné poriadne dotiahnuť priloženým kľúčom. Inak hrozí, že počas krátkeho obdobia dôjde k strhnutiu závitů.



### III. Konštrukcia

- 1 Drevená konštrukcia
- 2 Čalúnené vankúše 2 ks
- 3 Kolieska 4 ks
- 4 Výškový regulátor

### IV. Rozloženie stoličky

- 1 Zdvihnite hornú časť konštrukcie za sedák.
- 2 Nastavte požadovanú výšku umiestnením výškového regulátora do príslušného otvoru.

### V. Údržba a čistenie

- 1 Eko - koža, koženka: čistiť šetrným roztokom neparfémovaného mydla s vlažnou vodou s pomocou jemnej handričky. Nepoužívať rozpúšťadlá a saponáty.
- 2 Lakované a chrómované časti: čistiť pomocou vlhkej handričky. Nepoužívať rozpúšťadlá a brúsne prostriedky.
- 3 Drevo, preglejka: čistiť pomocou vlhkej handričky, utierať do sucha. Nepoužívať chemické prostriedky.

### VI. Dezinfekcia

Dezinfikovať bežne dostupnými dezinfekčnými prostriedkami bez obsahu alkoholu a chlóru.

### VII. Prevádzkové poznámky

- 1 Na stoličke smie sedieť len jedna osoba.

### VIII. Odporúčanie

- 1 Oboznámte sa so záručnými podmienkami a dodržiavajte pokyny pre inštaláciu, obsluhu a údržbu stoličky.

## Záručný list

*(Nevyžaduje podpis ani pečiatku, reklamáciu možno uplatniť bez dokladu o kúpe - stačí číslo objednávky.)*


Názov výrobku	<b>Kľakacia stolička Orion</b>	Číslo objednávky	
Kód tovaru	<b>2P</b>	Dátum predaja	

### Zápisy záručných opráv

Dátum nahlásenia	Dátum vyhotovenia	Popis vykonanej práce	Pečiatka a podpis servis. technika

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov od dátumu nákupu na poškodený materiál či dielenské spracovanie. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepravou, nesprávnym použitím alebo inou nehodou. Chybný produkt môže byť vrátený s popisom väd a adresou predajcu. Pre opravu v záručnej dobe postupujte podľa inštrukcií, pri objednávke nových častí opíšte číslo modelu, ktoré je na krabici výrobku.

# medimas

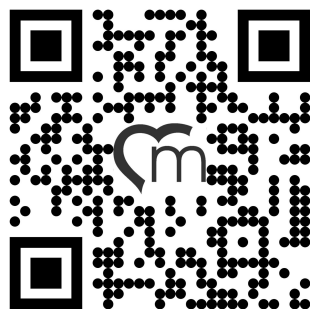

---

**ČESKÁ REPUBLIKA**

+420 737 02 03 04

[info@medimas.cz](mailto:info@medimas.cz)



**SLOVENSKO**

+421 949 64 43 48

[info@medimas.sk](mailto:info@medimas.sk)