


CZ	Návod k použití	2
	Ohřívač masážních lávových kamenů	
SK	Návod na použitie	7
	Ohrievač masážnych lávových kameňov	

MANUÁL



medimasTM
DO IT FOR LIFE

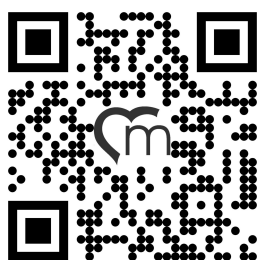

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybně sloužil mnoho let, přečtěte si prosím pozorně návod k použití.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS



Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: číslo objednávky nebo při nákupu u našeho obchodního partnera model, datum prodeje a výrobní číslo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

Návod na používání ohřívací nádoby na lávové kameny


I. Technické údaje

Ohřívač masážních kamenů	6L	18L
Barva	nerezová ocel	nerezová ocel
Výkon	750 W	1450 W
Napájení	230 V/60 Hz	230 V/60 Hz
Nastavitelná teplota	0 - 70 °C	0 - 70 °C
Rozměry přístroje	44 x 29,5 x 24 cm	52 x 38 x 24 cm
Rozměry nádoby	31 x 22,5 x 11 cm	44 x 30 x 14 cm
Hmotnost	3,5 kg	6,5 kg
Záruka	2 roky	2 roky
Certifikát	CE	CE

II. Funkce

Ohřívací nádoba na masážní lávové kameny. Plynulá regulace teploty umožňuje přesné nastavení požadované teploty. Bezporuchový regulátor zaručí, že nastavená teplota bude udržována během celého zákroku. Termostat umožňuje funkci předehřívání pro rychlé dosažení nastavené teploty.

III. Popis

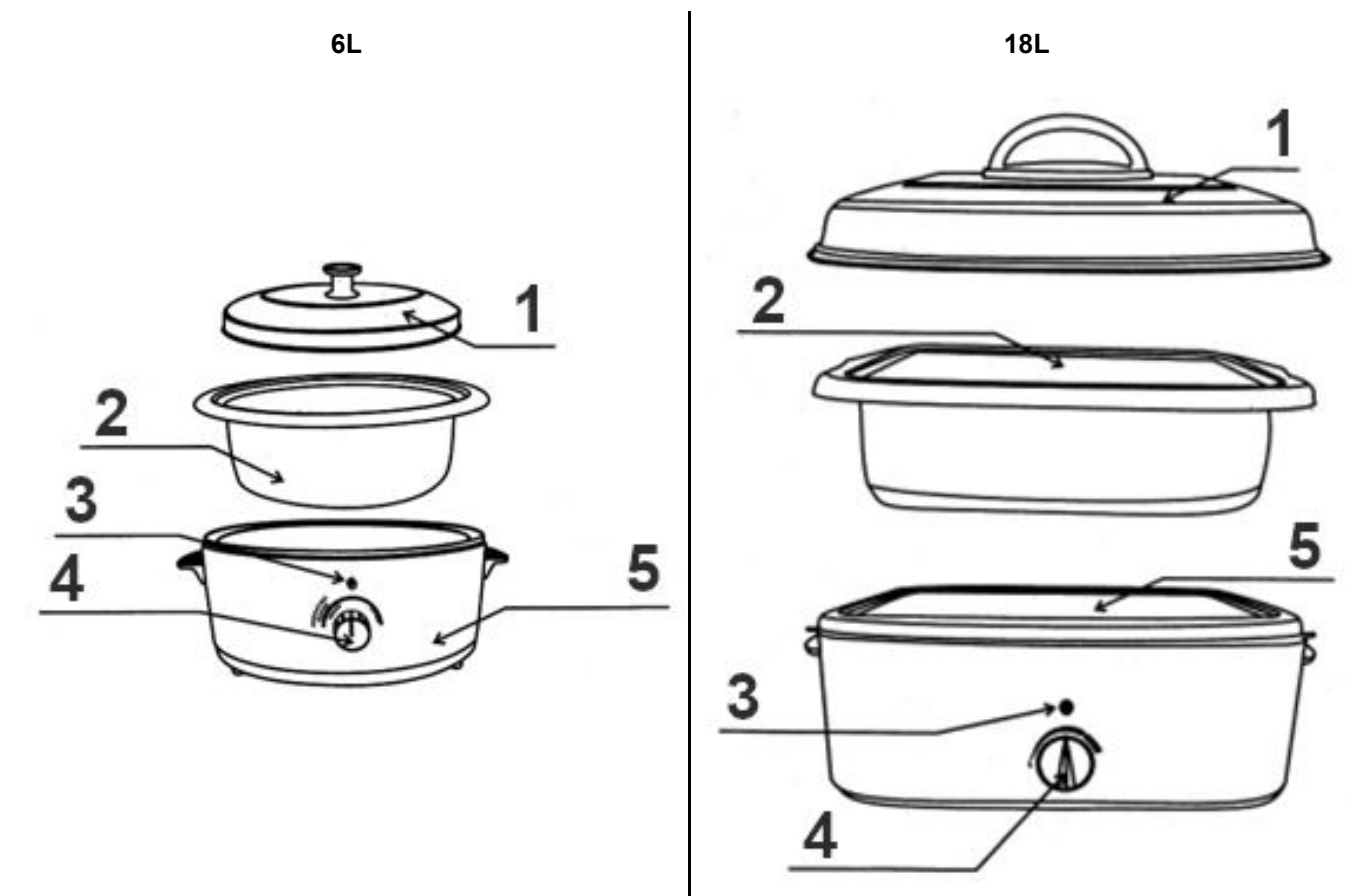

- 1 Kryt/poklice
- 2 Zásobník na vodu
- 3 Indikační svítící kontrolka
- 4 Regulátor teploty
- 5 Ohřívací jednotka

IV. Před prvním použitím

- 1 Vybalte ohřívač, vyndejte zásobník na vodu a všechny zabalené součásti a informační nálepky. Uložte ohřívač na dobře větrané místo na tepelně odolnou podložku.
- 2 Zjistěte si, zda váš ohřívač může být používán v elektrické síti vaší země (ČR –230/400 V / 50 Hz) – uvedeno na spodním štítku. Pokud parametry neodpovídají, přístroj nepoužívejte a ihned nás kontaktujte.
- 3 Otočte regulátor teploty po směru hodinových ručiček na maximum a zastrčte do zásuvky.
- 4 Nastavte regulátor teploty na pozici „Preheat“ (předehřátí) a nechte ohřívač zapnutý po dobu cca 60 minut nebo dokud se z něj nepřestane kouřit či se linout jakákoliv vůně nebo zápach.
- 5 Kouř, vůně či zápach jsou v průběhu prvního zahřívání normální – v běžném provozu se již nebudou objevovat.
- 6 Když je úvodní zahřátí ukončeno, otočte regulátorem teploty proti směru hodinových ručiček, abyste ohřívač vypnuli. Vypjte ho ze zásuvky a nechte vychladnout.

V. Použití

- 1 Lávové kameny před použitím pokaždé umyjte a vydezinfikujte.
- 2 Na dno zásobníku položte tenčí ručník s nižší gramáží a na ten naskládejte všechny kameny.
- 3 Před zastrčením napájecího kabelu do zásuvky dostatečně naplňte zásobník vodou tak, aby překryla kameny, nebo do maxima kapacity, ne však méně než 1 palec (2,5 cm) pod horní hranu. Do ohřivací jednotky (5) nalijte na dno menší množství vody, aby dno zásobníku (2) bylo ve vodě ponořeno (**ohřivač funguje i bez vody v ohřivací jednotce, tehdy však dochází k rychlejšímu opotřebení ohřivače**). Otočte regulátorem teploty naplno po směru hodinových ručiček. Přikryjte pokličkou.
- 4 Zastrčte kabel do standardní zásuvky 230 V. Regulátor teploty otočte na pozici „Preheat“ pro rychlý ohřev na dobu 20 až 30 minut. Jakmile voda dosáhne požadované teploty, nastavte regulátor na „Operating Range“, aby se udržovala požadovaná teplota.
- 5 K měření teploty vody v zásobníku používejte přesný teploměr, abyste se ujistili, že kameny mají správnou terapeutickou teplotu. Pokud si nejste jisti, poraďte se s profesionálním terapeutem.
- 6 Kontrolka (indikátor) teploty svítí přesně podle ohřivacích cyklů – pokud ohřivač pracuje (on), kontrolka svítí. Pokud nepracuje (off), kontrolka nesvítí.
- 7 Opatrně vyndejte první kámen ze zásobníku vody. Vyzkoušejte jeho teplotu nejprve dotykem prstu, poté jej podržte v dlani. Teplota by měla být horká na dotek, ale ne nepříjemná.
- 8 Po ukončení terapie otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček na doraz, abyste ohřivač vypnuli. Vždy, pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky.
- 9 Nepokládejte kameny přímo do ohřivací jednotky. Může to poškodit její funkčnost. Manipulaci s kameny v ohřivačce provádějte opatrně.
- 10 Nepokládejte teplé kameny na zanícené části těla.



Upozornění

Krátký přívodní kabel je dodáván schválně, aby se předešlo nehodám způsobeným zamotanými nebo volně loženými kabely.

VI. Údržba a čištění

- 1 Po každém použití ohřivač umyjte.
- 2 Před čištěním ohřivače nastavte regulátor teploty na minimum a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- 3 Před čištěním nechejte přístroj zchladnout na pokojovou teplotu.
- 4 Opatrně odstraňte nejdřív kameny, až poté vodu.
- 5 Vyčistěte zásobník na vodu a umyjte ho mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a vysušte suchým ručníkem.
- 6 Utřete ohřivací jednotku vlhkým hadříkem. Dávejte si pozor při čištění ohřivací jednotky. NIKDY neponořujte ohřivací jednotku do vody ani nepokládejte do dřezu pro její opláchnutí.
- 7 Propláchněte kameny v teplé vodě s trochou saponátu. Opláchněte je čistou teplou vodou a před uložením je usušte.

VII. Poznámky k bezpečnosti

- 1 Ohřivač lávových kamenů společnosti MEDIMAS by neměl být používán u následujících stavů: tuberkulóza, nádorová onemocnění, krvácení, modřiny, otevřená poranění kůže, trombóza či zánět žil, varixy nebo nedefinovatelné bolesti lýtek.
- 2 Těhotné ženy a lidé trpící cukrovkou či jinou nemocí by se měli prokázat písemným souhlasem lékaře dříve než podstoupí terapii.
- 3 Kontaktujte svého lékaře, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně terapeutických účinků masáží lávovými kameny ohřivaných v tomto ohřivači.
- 4 Pokud zjistíte jakékoliv příznaky nepohody nebo fyzických potíží během terapie, nepokračujte dále.
- 5 Pokud jste ospalí nebo již usínáte, nepoužívejte ohřivač.
- 6 Ohřivač lávových kamenů není hračka. BUĎTE MAXIMÁLNĚ OPATRNÍ při jeho používání a udržujte děti v dostatečné vzdálenosti.

Záruční list

(Nevyžaduje podpis ani razítko, reklamaci lze uplatnit bez dokladu o koupi - stačí číslo objednávky.)

Název výrobku		Číslo objednávky	
Kód zboží		Datum prodeje	

Zápisy záručních oprav


Datum nahlášení	Datum provedení	Popis vykonané práce	Razítko a podpis servis. technika

Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data nákupu na poškozený materiál či dílenské zpracování. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená přepravou, nesprávným použitím nebo jinou nehodou. Vadný produkt může být vrácen s popisem vad a adresou prodejce. Pro opravu v záruční době postupujte podle instrukcí, při objednávce nových částí opište číslo modelu, které je na krabici výrobku.

NEPŘEHLÉDNĚTE

V naší nabídce najdete také lávové kameny nezbytné k provedení masáže, které lze zakoupit jednotlivě nebo v sadách.

V případě zájmu, zadejte při nákupu tento slevový kód: **MedLavMan**

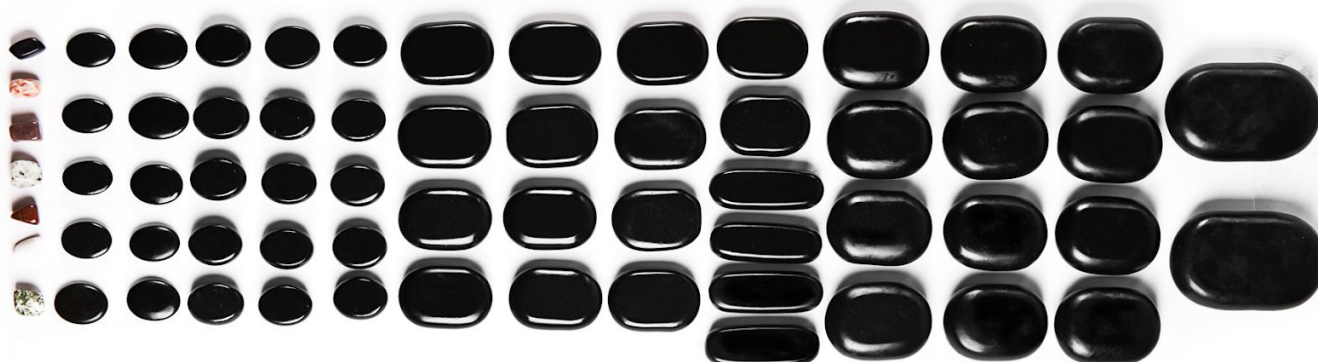



POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybne slúžil mnoho rokov, prečítajte si prosím pozorne návod na použitie.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS



Odporúčame používať originálne náhradné diely. Pri kontakte so servisným strediskom sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: číslo objednávky alebo pri nákupe u nášho obchodného partnera popřípade model, dátum predaja a výrobné číslo.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadny úraz ani škodu v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo použitia. Návod na použitie vždy uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste na jeho budúce použitie.

Návod na používanie ohrievacej nádoby na lávové kamene


I. Technické údaje

Orievač masážnych kameňov	6L	18L
Farba	nerezová oceľ	nerezová oceľ
Výkon	750 W	1450 W
Napájanie	230 V/60 Hz	230 V/60 Hz
Nastaviteľná teplota	0 - 70 °C	0 - 70 °C
Rozmery prístroja	44 x 29,5 x 24 cm	52 x 38 x 24 cm
Rozmery nádoby	31 x 22,5 x 11 cm	44 x 30 x 14 cm
Hmotnosť	3,5 kg	6,5 kg
Záruka	2 roky	2 roky
Certifikát	CE	CE

II. Funkcie

Ohrievacia nádoba na masážne lávové kamene. Plynulá regulácia teploty umožňuje presné nastavenie požadovanej teploty. Bezporuchový regulátor zaručí, že nastavená teplota bude udržiavaná počas celého zákroku. Termostat umožňuje funkciu predrievania na rýchle dosiahnutie nastavenej teploty

III. Popis

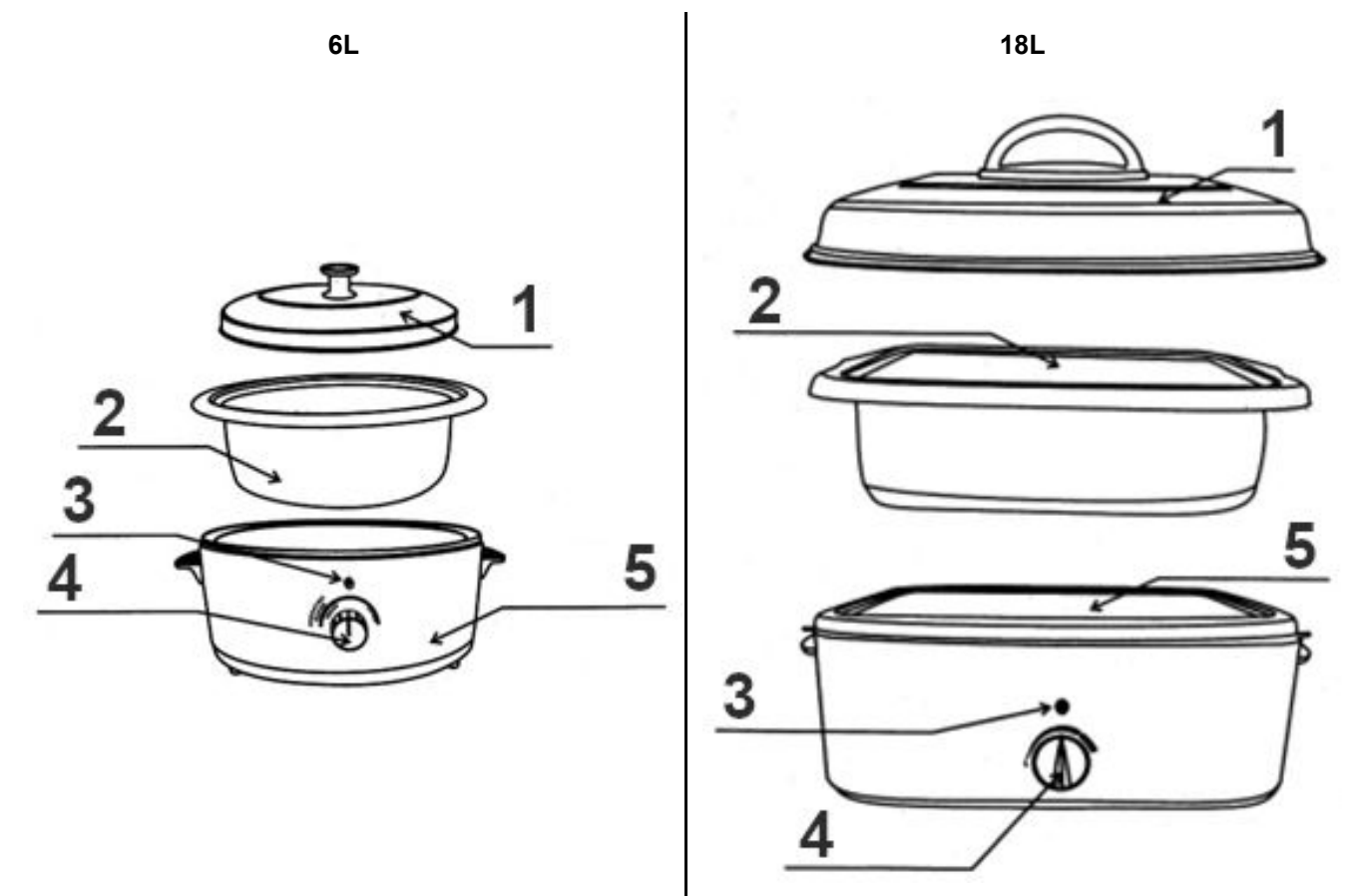

- 1 Kryt/pokrievka
- 2 Zásobník na vodu
- 3 Indikačná svietiacia kontrolka
- 4 Regulátor teploty
- 5 Ohrievacia jednotka

IV. Pred prvým použitím

- 1 Vybalte ohrievač, vyberte zásobník na vodu a všetky zabalené súčasti a informačné nálepky. Uložte ohrievač na dobre vetrané miesto na tepelne odolnú podložku.
- 2 Zistite si, či váš ohrievač môže byť používaný v elektrickej sieti vašej krajiny (ČR –230/400 V / 50 Hz) – uvedené na spodnom štítku. Pokiaľ parametre nezodpovedajú, prístroj nepoužívajte a ihneď nás kontaktujte.
- 3 Otočte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek na maximum a zastrčte do zásuvky.
- 4 Nastavte regulátor teploty na pozíciu „Preheat“ (predhriatie) a nechajte ohrievač zapnutý po dobu cca 60 minút alebo pokiaľ sa z neho neprestane dymiť či sa linúť akákoľvek vôňa alebo zápach.
- 5 Dym, vôňa či zápach sú v priebehu prvého zahrievania normálne – v bežnej prevádzke sa už nebudú objavovať.
- 6 Keď je úvodné zahriatie ukončené, otočte regulátorom teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ohrievač vypli. Vypojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

V. Použitie

- 1 Lávové kamene pred použitím zakaždým umyte a vydezinfikujte.
- 2 Na dno zásobníku položte tenší ručník s nižšou hmotnosťou a na ten naskladajte všetky kamene.
- 3 Pred zastrčením napájacieho kábla do zásuvky dostatočne naplňte zásobník vodou tak, aby prekryla kamene, alebo do maxima kapacity, nie však menej než 1 palec (2,5 cm) pod hornú hranu. Do ohrievacej jednotky (5) nalejte na dno menšie množstvo vody, aby dno zásobníku (2) bolo vo vode ponorené (**ohrievač funguje i bez vody v ohrievacej jednotke, vtedy však dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu ohrievača**). Otočte regulátorom teploty naplno v smere hodinových ručičiek. Prikryte pokrievkou. Zastrčte kábel do štandardnej zásuvky 230 V. Regulátor teploty otočte na pozíciu „Preheat“ pre rýchly ohrev na dobu 20 až 30 minút. Akonáhle voda dosiahne požadovanú teplotu, nastavte regulátor na „Operating Range“, aby sa udržiavala požadovaná teplota.
- 5 Na merania teploty vody v zásobníku používajte presný teplomer, aby ste sa uistili, že kamene majú správnu terapeutickú teplotu. Pokiaľ si nie ste istí, poraďte sa s profesionálnym terapeutom.
- 6 Kontrolka (indikátor) teploty svieti presne podľa ohrievacích cyklov – pokiaľ ohrievač pracuje (on), kontrolka svieti. Pokiaľ nepracuje (off), kontrolka nesvieti.
- 7 Opatrne vyberte prvý kameň zo zásobníku vody. Vyskúšajte jeho teplotu najskôr dotykom prstu, potom ho podržte v dlani. Teplota by mala byť horúca na dotyk, ale nie nepríjemná.
- 8 Po ukončení terapie otočte regulátor teploty v protismere hodinových ručičiek nadoraz, abyste ohrievač vypli. Vždy, pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- 9 Nekladte kamene priamo do ohrievacej jednotky. Môže to poškodiť jej funkčnosť. Manipuláciu s kameňmi v ohrievadle uskutočňujte opatrne.
- 10 Nekladte teplé kamene na zapálené časti tela.



Upozornenie

Krátky prívodný kábel je dodávaný schválne, aby sa predišlo nehodám spôsobeným zamotanými alebo voľne položenými káblami.

VI. Údržba a čistenie

- 1 Po každom použití ohrievač umyte.
- 2 Pred čistením ohrievača nastavte regulátor teploty na minimum a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- 3 Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu.
- 4 Opatrne odstráňte najskôr kamene, až potom vodu.
- 5 Vyčistite zásobník na vodu a umyte ho mydlovou vodou, opláchnite čistou vodou a vysušte suchým ručníkom.
- 6 Utrite ohrievaciu jednotku vlhkou handričkou. Dávajte si pozor pri čistení ohrievacej jednotky. NIKDY neponárajte ohrievaciu jednotku do vody ani nekladte do drezu na jej opláchnutie.
- 7 Prepláchnite kamene v teplej vode s trochou saponátu. Opláchnite ich čistou teplou vodou a pred uložením ich usušte.

VII. Poznámky k bezpečnosti

- 1 Ohrievač lávových kameňov spoločnosti MEDIMAS by nemal byť používaný pri nasledovných stavoch: tuberkulóza, nádorové ochorenia, krvácanie, modriny, otvorené poranenia kože, trombóza či zápal žíl, varixy alebo nedefinovateľné bolesti lýtok.
- 2 Tehotné ženy a ľudia trpiaci cukrovkou či inou chorobou by sa mali preukázať písomným súhlasom lekára skôr než podstúpi terapiu.
- 3 Kontaktujte svojho lekára, pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom terapeutických účinkov masáže lávovými kameňmi ohrievaných v tomto ohrievači.
- 4 Pokiaľ zistíte akékoľvek príznaky nepohody alebo fyzických ťažkostí počas terapie, nepokračujte ďalej.
- 5 Pokiaľ ste ospalí alebo už zaspávate, nepoužívajte ohrievač.
- 6 Ohrievač lávových kameňov nie je hračka. BUĎTE MAXIMÁLNE OPATRNÍ pri jeho používaní a udržiajte deti v dostatočnej vzdialenosti.

Záručný list

*(Nevyžaduje podpis ani pečiatku, reklamáciu možno uplatniť bez dokladu o kúpe
- stačí číslo objednávky.)*

Názov výrobku		Číslo objednávky	
Kód tovaru		Dátum predaja	

Zápisy záručných opráv


Dátum nahlásenia	Dátum vyhotovenia	Popis vykonanej práce	Pečiatka a podpis servis. technika

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov od dátumu nákupu na poškodený materiál či dielenské spracovanie. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepravou, nesprávnym použitím alebo inou nehodou. Chybný produkt môže byť vrátený s popisom väd a adresou predajcu. V prípade opravy v záručnej dobe postupujte podľa inštrukcií, pri objednávke nových častí opíšte číslo modelu, ktoré je na krabici výrobku.


NEPREHLIADNITE

V našej ponuke nájdete takisto lávové kamene nevyhnutné na uskutočnenie masáže, ktoré možno zakúpiť jednotlivo alebo v sadách.

V prípade záujmu, zadajte pri nákupe tento zľavový kód: **MedLavMan**

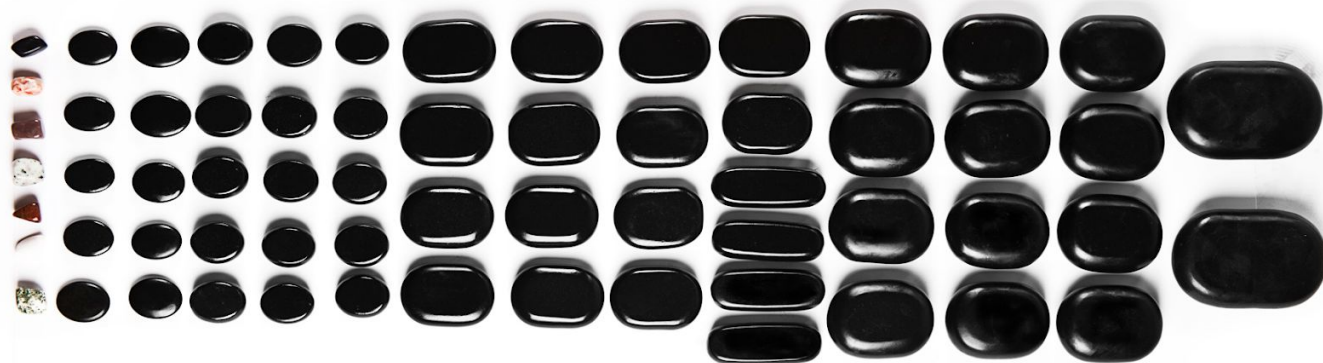

medimas

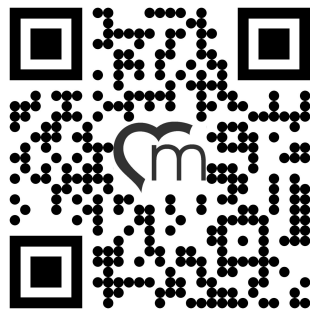

ČESKÁ REPUBLIKA

+420 737 02 03 04



info@medimas.cz



SLOVENSKO

+421 949 64 43 48

info@medimas.sk